

Lifenaxx® * Uživatelská příručka

Otoskop LX-033

Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (na spodní liště „Konformitätserklärung“). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 012643 (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

E-mail zdarma: support@technaxx.de

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili.

Záruka 2 roky

Tento výrobek je určen k použití u lidí a zvířat. Výrobek lze používat pouze k čištění a kontrole zvukovodu nebo nosní dutiny. Při používání zařízení dávejte pozor, abyste nepronikli příliš hluboko do otvorů, mohlo by dojít k poškození.

Vlastnosti

- CMOS videokamera 2MP
- Rozlišení 1920 x 1080P 30FPS.
- 6osý gyroskop
- Zaostřovací vzdálenost 1,5-3cm
- Indikátor stavu baterie
- Kapacita karty TF 32GB
- Rotace obrazu videa 180°

Technické specifikace


USB (pouze v suchém stavu)	5V max. 1A
Baterie	3,7V / 2 500mAh
Kamera	2MP, 1920 x 1080, 30FPS
Provozní doba	4 – 5 hodin
Doba nabíjení	~ 2 hodiny
Kontrolka LED	6
Průměr čočky	Ø 3,9mm
Rozměry	15,6 x 7,5 x 1,9cm
Hmotnost	187g
Displej / rozlišení	4,5 palce / 854 x 480
Jazyky	DE, EN, FR, CN, JA, SP, IT, RU

Příslušenství

	3 bezpečnostní trychtýře
	4 různé ušní lžičky
	1 stojan displeje
	1 karta TF 32GB

První použití

- Pomocí USB kabelu přístroj plně nabijte, nabíjení může trvat až 2 hodiny
- Před zapnutím přístroje připojte k otoskopu kameru. ● Do příslušné zdířky (9) vložte TF kartu a ujistěte se, že kontakty karty jsou orientovány ve směru displeje (karta musí na místo slyšitelně zacvaknout)
- Otoskop zapněte stiskem tlačítka on/off (zap./vyp.) (8) po dobu 1 - 2 vteřin.
- Implicitně nastavený jazyk je němčina, přičemž systém podporuje také angličtinu, čínštinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, ruštinu a japonštinu.
- Pro změnu jazyku dvakrát stiskněte tlačítko nastavení (7), otevřete nabídku Language (jazyk), stiskněte tlačítko OK (6) a pomocí směrového tlačítka (7) zvolte požadovaný jazyk. Opětovným stiskem tlačítka OK (6) potvrďte volbu preferovaného jazyka.
- Stejným způsobem můžete upravit nastavení času a data v nabídce Date/Time (datum/čas), nebo automatické vypnutí v příslušné nabídce nastavení.
- Pokud nelze pořizovat fotografie či videa, ujistěte se, že je TF karta správně naformátována (FAT32).
- TF kartu naformátujete tak, že dvakrát stiskněte tlačítko nastavení (7), pomocí směrových tlačítek (4) vyberte nabídku Format (formát) a stiskněte tlačítko OK (6) a vyberte nabídku OK.

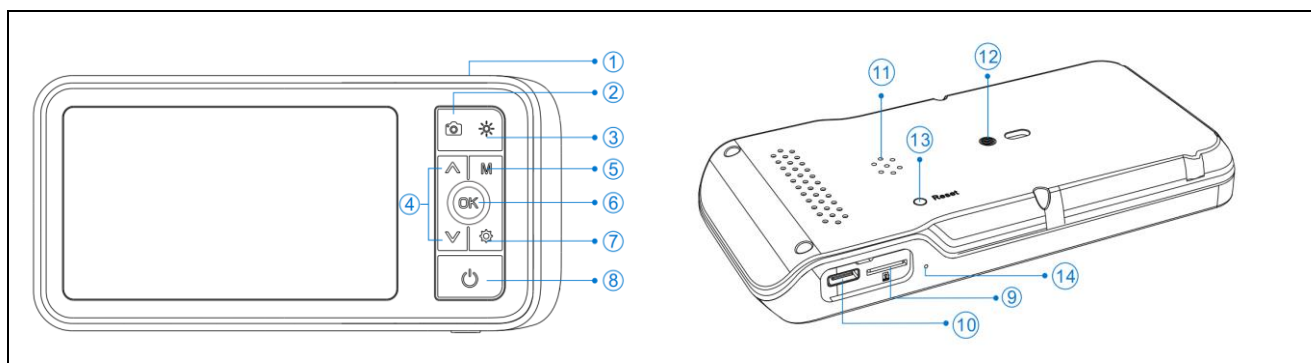

1	Konektor kamery	2	Tlačítko fotografie / videa 
3	Ovládání jasu kontrolky LED kamery	4	Posun nahoru a dolů nabídkou a otáčení obrazu / videa na kameře
5	Tlačítko přepínání mezi režimy	6	OK, potvrzení změn a zmrazení obrazu

	fotografie, videa a přehrávání		
7	Nastavení	8	Tlačítko on/off (zap./vyp.) (podržte 1 vteřinu)
9	Vestavěný otvor na TF kartu 32GB	10	Nabíjecí port (USB-C, max. 5V, 1A)
11	Reproduktor	12	Instalační otvor držáku
13	Reset	14	Mikrofon

Návod k použití

● Před zapnutím přístroje propojte kameru s otoskopem. ● Do příslušné zdičky (9) vložte TF kartu a ujistěte se, že kontakty karty jsou orientovány ve směru displeje (karta musí na místo slyšitelně zacvaknout) ● Otoskop zapněte stiskem tlačítka on/off (zap./vyp.) (8) po dobu 1 - 2 vteřin. ● Pro první pohled použijte jeden z bezpečnostních trychtýřů. ● Ušní kanál není dokonale rovný, opatrně upravte pozici otoskopu ve vašem uchu. ● Pro jasnější pohled bez oslnění můžete upravit jas kontrolky LED (3).

● Ohnisková vzdálenost kamery je 1,5-3cm, pro zaostření upravte vzdálenost mezi objektivem kamery a vaším uchem.

Pro pořízení snímku můžete stisknout  (2), pro změnu na režim videa stiskněte a podržte tlačítko MODE (režim) a opětovným stiskem tlačítka  (2) můžete záznam videa spouštět a zastavovat. Pro přepínání mezi archivy fotografií a videí znovu stiskněte tlačítko MODE (režim), pomocí směrového tlačítka (4) vyberte požadovaný soubor a pro zobrazení / přehrávání stiskněte tlačítko OK.

Připojení k počítači (Windows 10)

● Připojte USB kabel k otoskopu, pak do USB portu svého počítače. Po zapnutí otoskopu najdete v Průzkumníku nové USB zařízení. ● Složka DCIM obsahuje vaše snímky a videa.

Normální použití

● Otoskop by měl být zasunut do zvukovodu či nosu pouze když je nasazena lžice nebo bezpečnostní trychtýř.

● Nasadte lžici či bezpečnostní trychtýř na otoskop tak, aby pevně seděly.

● buďte opatrní zvukovod a nos jsou citlivé.

Čištění

Před a po použití byste měli vyčistit kameru, lžici a bezpečnostní trychtýř.

Bezpečnostní instrukce

→ Nedívejte se do LED světla. → Nabíjejte pouze pomocí dodané nebo

kompatibilní USB nabíječky. → Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami s omezenou mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a / nebo chybějícími odbornými znalostmi. → Zařízení není určeno pro komerční použití. → Jakékoli jiné použití nebo modifikace zařízení je považováno za nevhodné a představuje významné riziko. → Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Před použitím zkontrolujte správnou funkci zařízení! → Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné známky poškození → Nepoužívejte zařízení v oblastech s nebezpečím požáru nebo výbušnin (např. v prostředí nasyceném kyslíkem nebo v anestezii). → Tento produkt nesmí vstupovat nebo být používán v oblastech se silnými magnetickými poli, např. MRI skenery. → Nikdy nenechávejte zařízení v procesu nabíjení bez dozoru. → Nezapomeňte adaptér dezinfikovat. Před kontaktem s pokožkou povrch přístroje očistěte 75% roztokem lékařského lihu. Adaptéry dezinfikujte 10 minut v páře nebo horké vodě. → Toto zařízení není určeno k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, Při práci se zařízením dbejte na to, aby v jeho blízkosti nebyli žádní přihlížející a především pak děti.

UPOZORNĚNÍ & VAROVÁNÍ:

UPOZORNĚNÍ: Tento produkt není určen k použití v profesionálních lékařských zařízeních, není-li k němu speciálně upraven. Pouze pro dospělé, nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusnatým a také v blízkosti hořlavých materiálů, kouře nebo plynů. Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně nebo na přímém slunečním světle. Udržujte zařízení v suchu. Neponořujte zařízení do vody.



Pokyny pro bezpečnou práci s bateriemi a jejich likvidaci:

Držte baterie mimo dosah dětí. V případě, že baterii dítě spolkne, navštivte s ním ihned lékaře či nemocnici! Dbejte na správnou polaritu (+) a (-) baterií! V případě výměny vždy



vyměňte všechny baterie. Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Baterie nikdy nezkratujte, neotvírejte, nedeformujte, ani nenabíjejte! **Nebezpečí poranění** Nikdy nevhazujte baterie do ohně! **Nebezpečí výbuchu!** **Rady pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení nebo baterie do domovního odpadu. **Čištění:** Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním (používejte čisté závěsy). Nepoužívejte drsné hrubozrnné

materiály nebo rozpouštědla/agresivní čisticí prostředky. Řádně vyčistěte čištěné zařízení. **Důležité upozornění:** Pokud by došlo k vytečení baterie, vytřete oddělení na baterie měkkým hadříkem do sucha. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo